

# Kit 20 Tests serológicos covid19

Estos test permiten mediante la extracción de sangre en el dedo, detectar la presencia de anticuerpos . El proceso de detección dura 15 minutos y tiene una tasa de fiabilidad superior al 95%.

- Permite tener seguridad de estar libre de covid en tu empresa
- Ofrece confidencialidad en la prueba al realizarse directamente por la empresa.
- Permite aislar a las personas con riesgo y reducir el riesgo de contagio a otros trabajadores.
- Permite recibir visitas en la empresa pudiendoles hacer el test antes de entrar en contacto con ellas.
- Tests con el certificado CE ya utilizado en laboratorios y clínicas nacionales.
- Los tests deben matenarse entre 2 y 30 grados
- A la hora de hacer la prueba, deben haber estado a temperatura ambiente al menos 15 minutos.
- La caducidad de los tests es finales de 2021.



## Indicaciones de uso

- 1 - limpiar el dedo con la toallita de alcohol
- 2 - pinchar con la lanceta
- 3 - deshechar primera gota y limpiar
- 4 - absorber gota de sangre con el tubo
- 5 - depositar gota de sangre en el test
- 6 - añadir 3 gotas del reactivo
- 7 - esperar el resultado

El kit se compone de **4 packs de 5 tests**, cada uno de ellos, con todos los elementos necesarios para hacer la prueba.

- **5 Tests serológico**
- **5 Toallitas alcohol desinfectante**
- **5 Tubos de absorción**
- **5 Lancetas automáticas**
- **Buffer para los 5 tests**

