

www.liftak.com



LIFTÄK

MANUAL DE USO
PLATAFORMA SALVAESCALERAS STARK

liftak.com



NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Estas normas de seguridad son parte integral del producto. Lea atentamente la información de este manual, ya que contiene instrucciones importantes para el uso y el mantenimiento seguro del sistema. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y asegúrese de que todas las personas que operan el sistema estén familiarizadas con ellas. Este producto solo debe usarse para el propósito específico para el que fue diseñado, no es adecuado para ningún otro uso y es peligroso.

El usuario final de la plataforma siempre es responsable de cumplir con los requisitos y directivas de seguridad local, y de la idoneidad de la ubicación de la instalación. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto. No permita que los niños jueguen mientras está funcionando o usen el sistema.

En caso de avería del producto, no intente reparar la máquina usted mismo, póngase en contacto con técnicos profesionales autorizados. Todo el mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados por técnicos profesionales autorizados. Para asegurar un funcionamiento correcto y eficiente del sistema, siga las instrucciones del fabricante con respecto al mantenimiento, especialmente todos los equipos de seguridad deben revisarse periódicamente. Todos los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación deben registrarse y los registros deben ponerse a disposición del usuario.



ADVERTENCIA: El incumplimiento de lo anterior puede resultar en peligros.

Antes de iniciar el proceso de instalación, se debe leer atentamente el manual de instalación y seguir correctamente el orden de instalación. La instalación debe ser realizada por técnicos y distribuidores autorizados por LIFTÄK. Lleve siempre el manual de instalación con el producto. Si hay una situación que no puede resolver, comuníquese con LIFTÄK.



Liftak se reserva el derecho de realizar cambios y arreglos en guías y documentos técnicos.

Características del producto

La plataforma Liftak Stark (plataforma salvaescaleras) está diseñada para transportar personas con discapacidad en sillas de ruedas, **opcionalmente** con un asiento integrado frente a la plataforma cuando no se usa silla de ruedas.

La plataforma se mueve sobre dos railes metálicos diseñados específicamente para esta plataforma, apoyados por soportes fijados a los postes o a la pared.

La plataforma incluye:

- 1 plataforma plegable con superficie antideslizante y con rampas automáticas.
- Botones de control, brazos de barrera de seguridad plegables y un motor montado en riel.
- 2 mandos a distancia accionados por llaves

La plataforma es accionada por un mecanismo de piñón y cremallera controlado por un motor eléctrico equipado con un engranaje reductor irreversible y freno electromagnético.

Hay puntos de carga en la parte superior e inferior, cargan 6 baterías dentro de la máquina.







Instrucciones de seguridad

Este sistema de plataforma salvaescaleras está diseñado para que personas que utilicen una silla de ruedas o vehículos a batería puedan eliminar la barrera arquitectónica.

Opcionalmente, la plataforma puede equiparse con un asiento plegable para el uso de una sola persona.

Este sistema no está diseñado para más de un usuario simultáneamente. El equipo solo debe ser operado por personas capacitadas en la operación y mantenimiento de este sistema. Las personas imposibilitadas para su uso deberán ser asistidas por la supervisión de una persona capacitada. Este sistema no está diseñado para transportar animales o mercancías.

No se debe exceder la capacidad de carga máxima permitida (ver "Capacidad de carga" declarada en la placa de instrucciones).



liftak.com

PASOS

1. Gire la llave del mando a distancia para activar la plataforma y pulse el botón de apertura de la plataforma.
2. Al subir a la plataforma, presione el botón de subir o de bajar hasta que se detenga automáticamente.
3. La rampa de bajada y los brazos se abrirán automáticamente.
4. A continuación, la persona puede bajarse de la plataforma.
5. Pulse el botón de plegado de la plataforma.

ADVERTENCIAS

- Durante los desplazamientos de la máquina, no intente abrir los brazos y no intente bajarse de la plataforma.
- No toque los raíles ni el piñón-cremallera de ninguna manera.
- En caso de emergencia, detenga la máquina presionando el botón de parada de emergencia.
- Para obtener asistencia póngase en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico.

Modelo: Stark **Capacidad de carga:** 250 kg

Siempre se debe seguir el orden de las instrucciones listadas en el manual para realizar cada operación. La escalera siempre debe estar bien iluminada cuando se utilice la plataforma. La escalera y los raíles deben estar libres de cualquier obstáculo.

Los usuarios de sillas de ruedas siempre deben aplicar el freno de la silla de ruedas después de subir a la plataforma.

La plataforma está equipada con dispositivos automáticos de apertura y cierre, no fuerce las piezas.

No utilice la plataforma en caso de incendio, inundación o terremoto.

En caso de mal funcionamiento, contacte con el servicio técnico autorizado.

Uso de la plataforma

Encender y apagar la plataforma

Después de la instalación y las pruebas finales realizadas por un técnico autorizado, la plataforma se puede poner en marcha.

Para encender la plataforma, el fusible debe estar encendido y las llaves de los mandos deben estar giradas. Para apagar la plataforma, el fusible debe estar apagado. La plataforma se apaga solo en caso de fallo o corte de energía para proteger la batería.



imagen 1: fusible



imagen 2: la llave del mando a distancia

Control de la plataforma

La plataforma se controla con los mandos y el panel de control incorporado en la plataforma.

Para que la plataforma funcione correctamente todos los botones tienen que mantenerse pulsados. Si se suelta el botón la operación se detiene. Por ejemplo, si se suelta el botón durante el viaje, la plataforma se detendrá antes de llegar a su destino. Para completar el recorrido es necesario pulsar nuevamente el botón y mantener pulsado hasta que la plataforma complete la operación.

Advertencias:

- Durante el desplazamiento de la máquina, no intente abrir los brazos y no intente bajarse de la plataforma.
- No toque los raíles ni el piñón-cremallera de ninguna manera.
- En caso de emergencia, detenga la máquina presionando el botón de emergencia.

Los pasos a seguir:

1. Antes de operar la plataforma, verifique que no haya obstaculos en la escalera.
2. Gire la llave del mando a distancia para activar la plataforma y pulse el botón de apertura de la plataforma.
3. Al subir a la plataforma, presione el botón de subir o de bajar hasta que se detenga automáticamente.
4. La rampa de bajada y los brazos se abrirán automáticamente.
5. A continuación, la persona puede bajarse de la plataforma.
6. Pulse el botón de plegado de la plataforma.

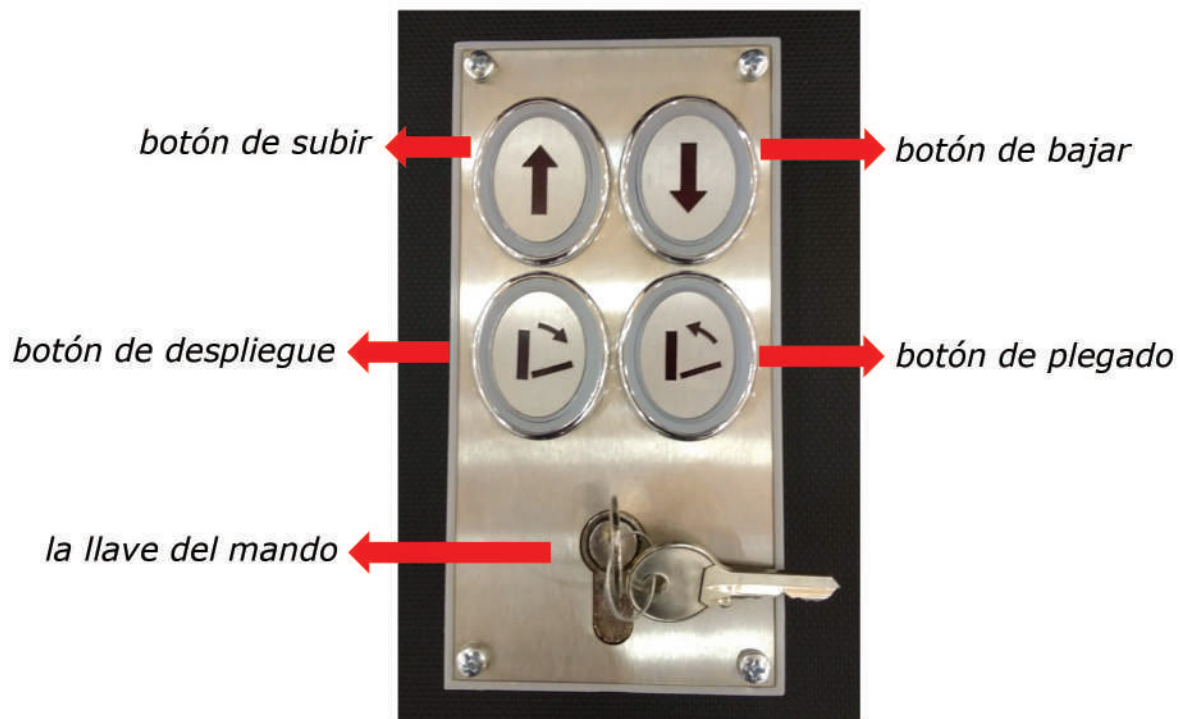


imagen 3: botón de emergencia

Botón de emergencia

El botón rojo en el panel de control es el botón de emergencia. Cuando se pulsa la plataforma para inmediatamente.

Para operar nuevamente la plataforma, hay que girar el botón de emergencia hacia derecha hasta que vuelva a su primera posición.

www.liftak.com



LIFTÄK 



liftak.com

