




El dispositivo anti-atragantamiento de primeros auxilios original .  
No te conformes con menos.



# Componentes y materiales I

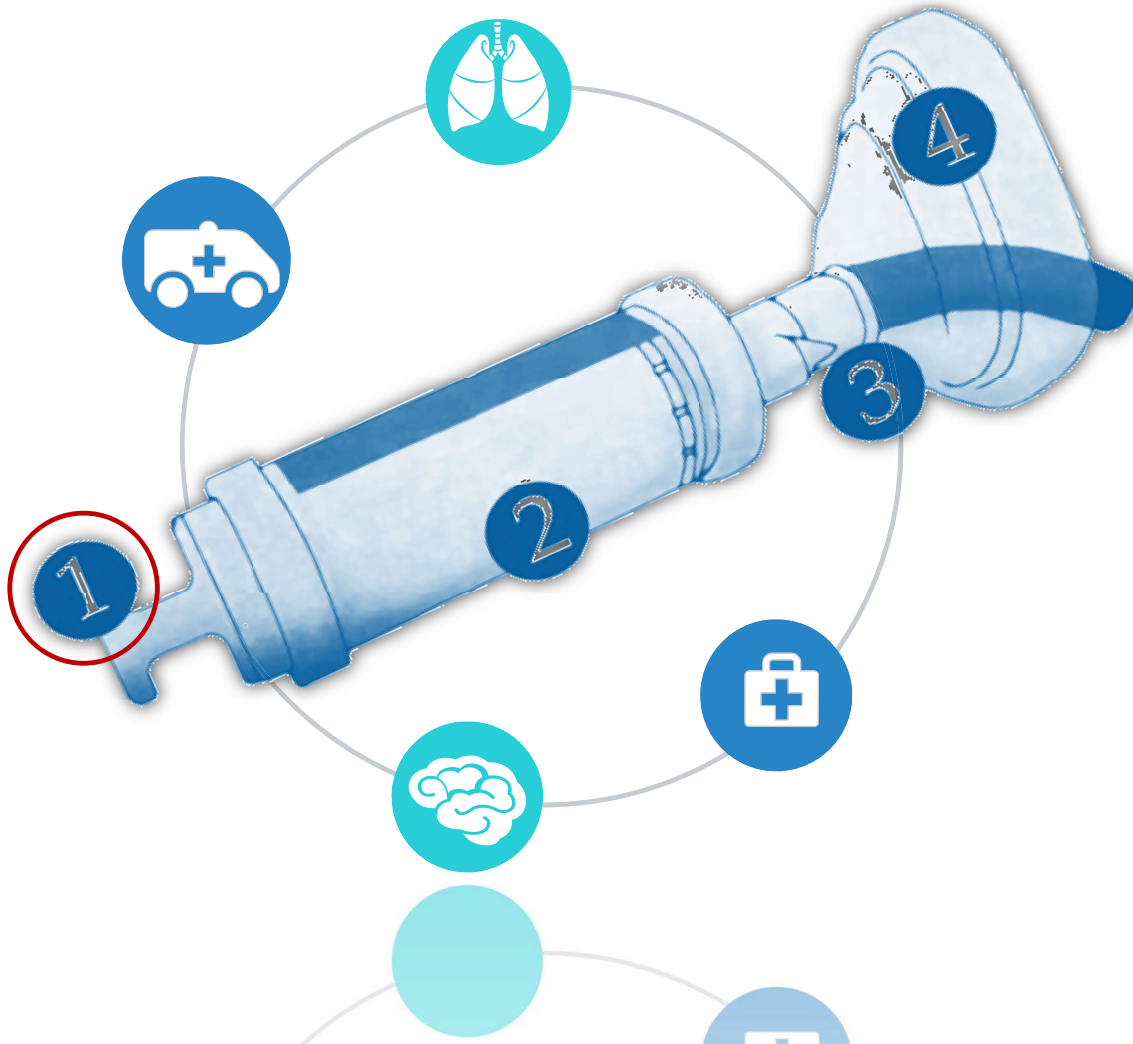


## 01 Émbolo

Un **suave** y ligero tirón del émbolo permite usar el DECHOKER hasta sus máximas posibilidades.

En combinación con el lubricante del O-Ring, **reduce el esfuerzo requerido** para succionar, haciendo que la fuerza necesaria para desplazarlo sea muy inferior a la fuerza de succión aplicada.




# Componentes y materiales II

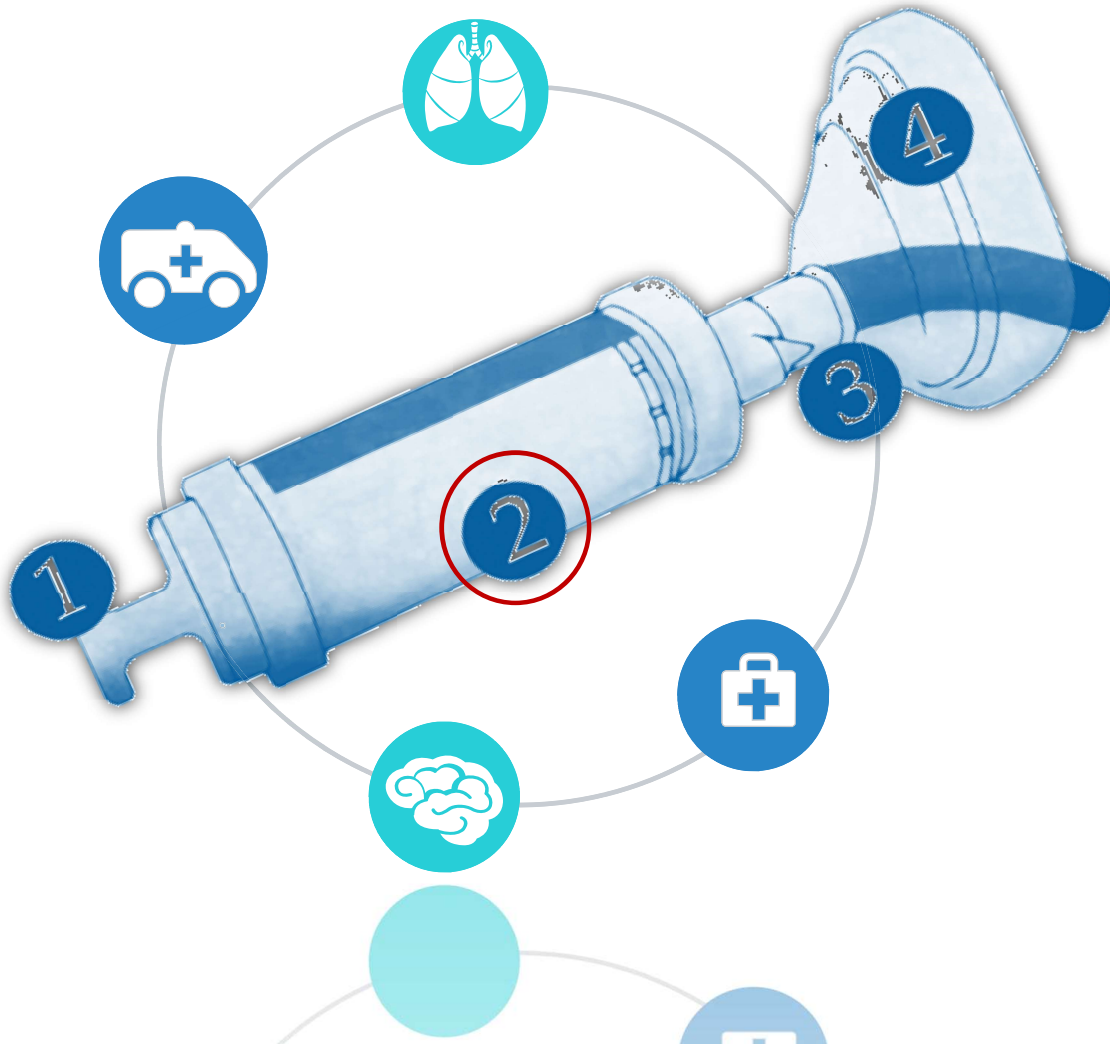


## 02 Cilindro receptor

El cilindro ha sido diseñado para proporcionar la presión de **succión óptima** necesaria para desalojar un cuerpo extraño atascado en las vías respiratorias de cualquier persona.

Almacena **los detritus extraídos**.

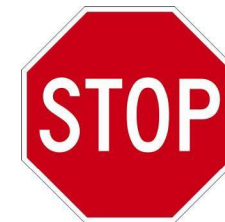

# Componentes y materiales III

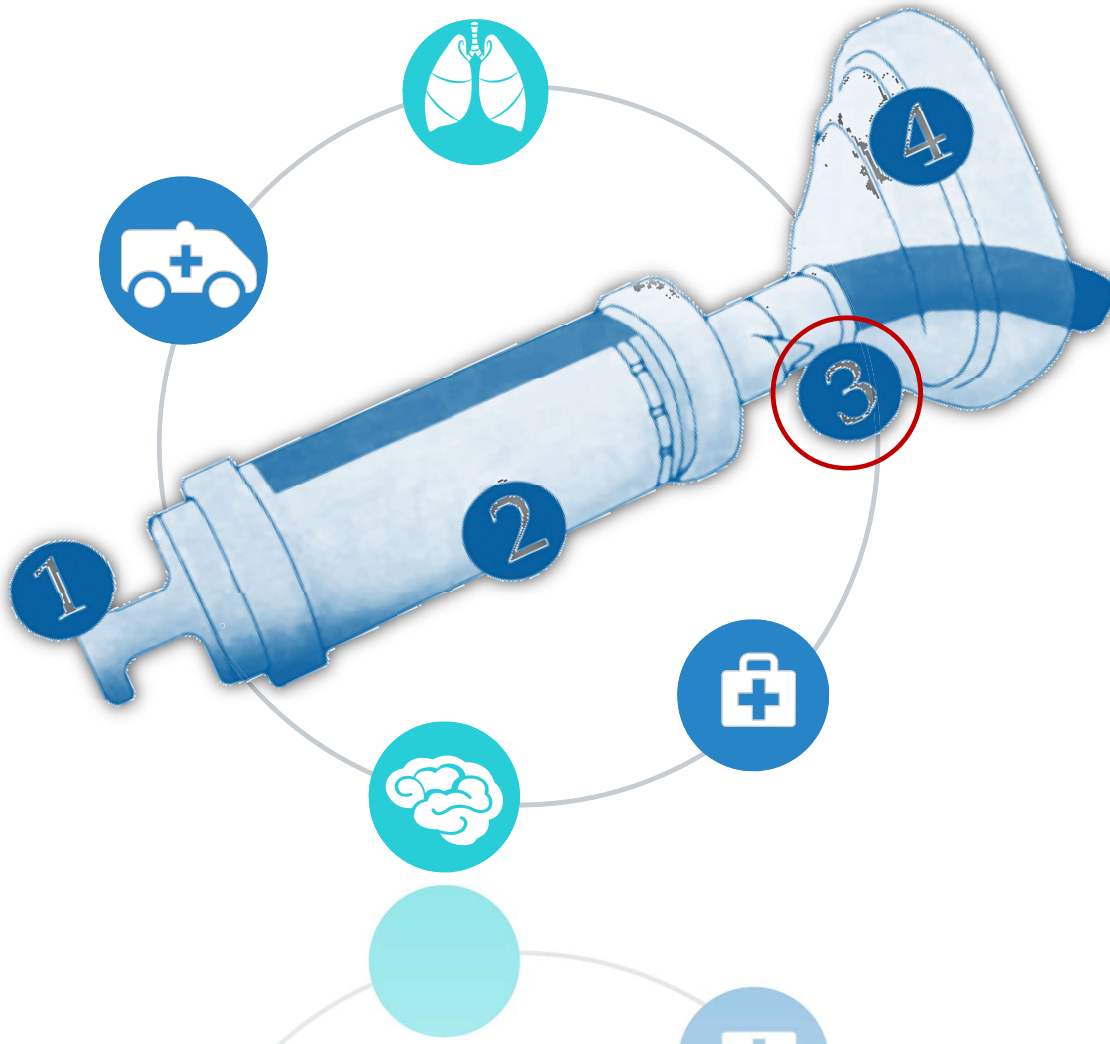


## 03 Sistema de Válvulas de Seguridad

Una vez están las sustancias en el cilindro, **impide que los restos succionados regresen** y se reintroduzcan en las vías respiratorias aunque se empuje de nuevo el émbolo, facilitando la salida de fluidos hacia el exterior del paciente.




# Componentes y materiales IV

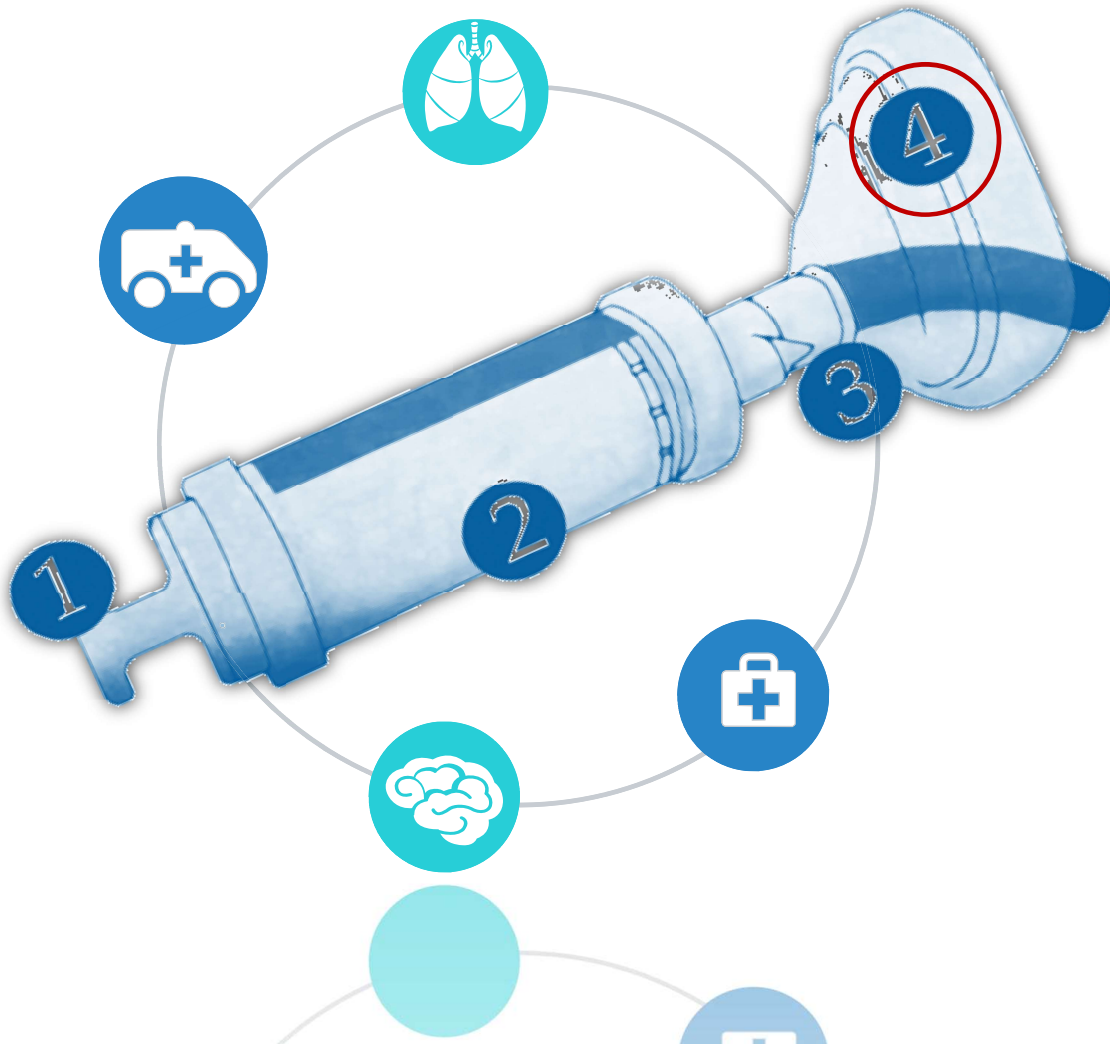


## 04 Tubo depresor

Ayuda a **deprimir la lengua** para que no estorbe, **direcciona la succión** para que vaya hacia la tráquea y **evita colapso** por la mucosa yugal.

El tubo no llega a meterse en la garganta, se queda “al final” de la parte visible de lengua.

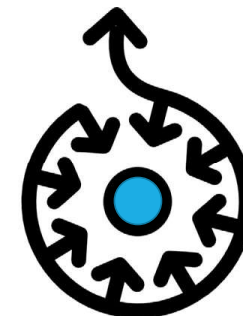

# Componentes y materiales V

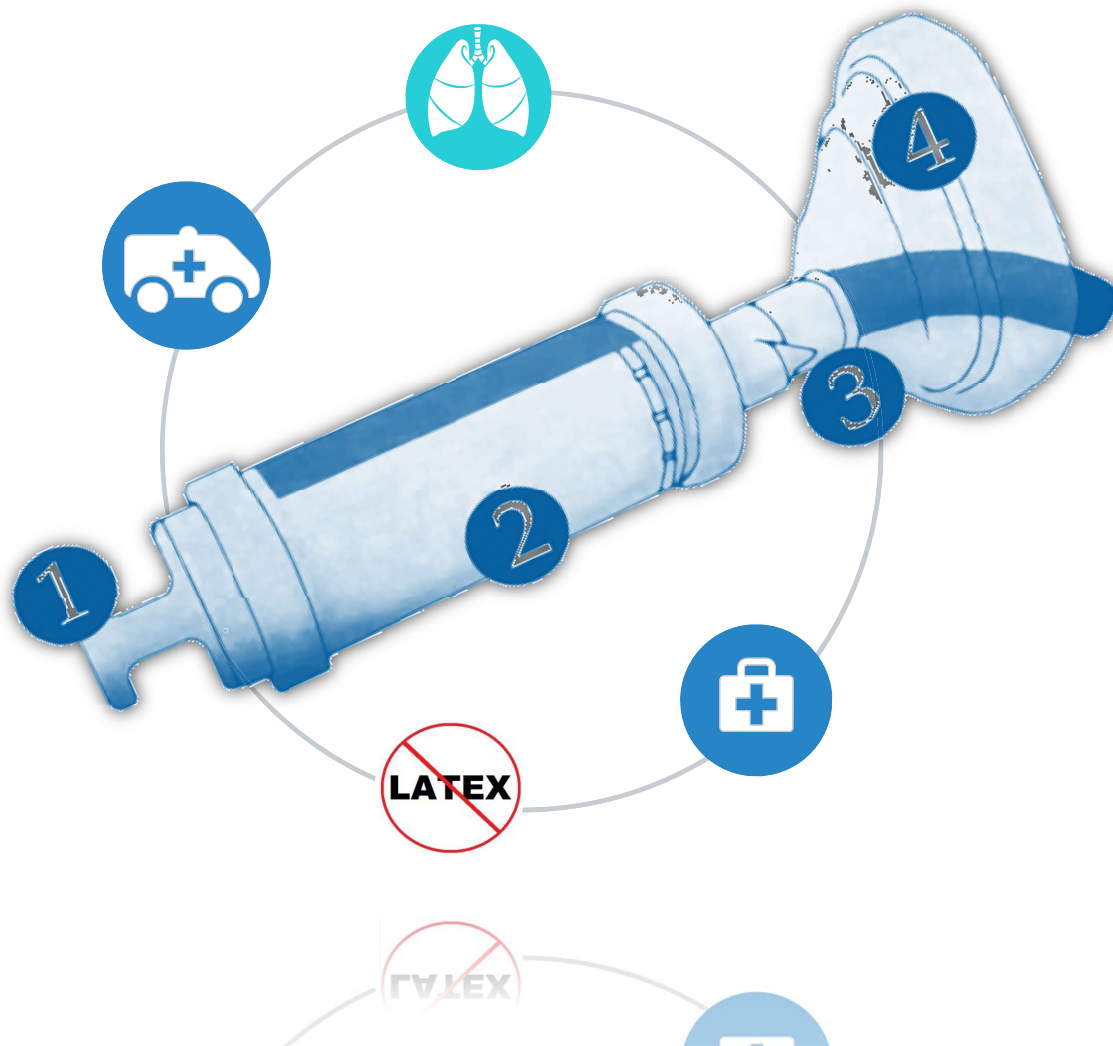

## Libre de látex

**LATEX  
FREE**

En las últimas décadas, la alergia al látex se ha convertido en un **problema de salud de relevancia mundial**. Se ha estimado que entre el 0.3 y el 1% de la población general es alérgica a esta sustancia.

Los principales grupos de riesgo son los pacientes multioperados (espina bífida...) y con anomalías urogenitales, y todos aquellos profesionales que para su trabajo diario emplean guantes de látex.

En este segundo grupo hemos de incluir al **personal sanitario**, con un porcentaje de alergia entre un 3 y un 25%.

- SGAIC



# Características



Rápido




Seguro



Sólidos y líquidos



Autoaplicable

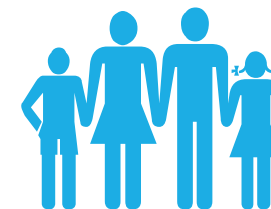

Lego



Sin batería



Libre de látex



Reutilizable




Asequible



FDA · CE · ISO

# Seguridad durante la aplicación I

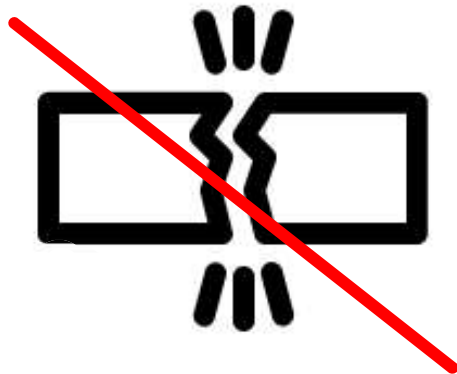


## No se desmonta al tirar

Todas nuestras partes van ensambladas de manera fija, formando una única e inseparable pieza.

Esta particularidad está enfocada precisamente para ofrecer la máxima seguridad: **impidiendo el desmantelamiento accidental** durante su uso, con la consecuente pérdida de tiempo y riesgo añadido al paciente.



# Seguridad durante la aplicación II

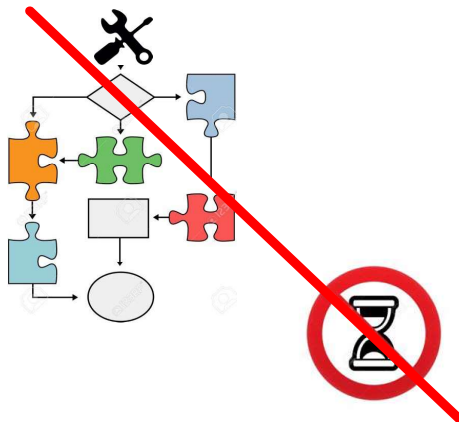


No se desperdicia tiempo

Todas nuestras partes van ensambladas de manera fija, formando una única e inseparable pieza.

Esta particularidad está enfocada precisamente para ofrecer la máxima seguridad: **no se pierde tiempo en manipulación y montaje**. Los secuelas de un atragantamiento son tiempo dependientes. Cada segundo cuenta.

# Succión tanto de **sólidos** como de **líquidos**

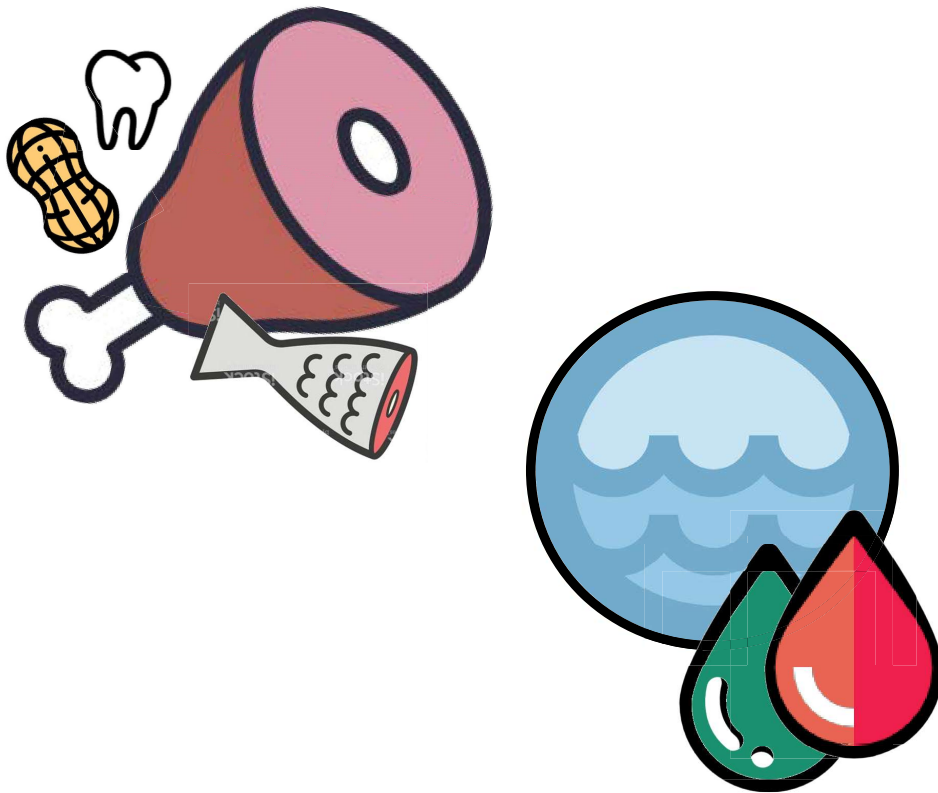

Gracias a:

- Cilindro receptor
- Sistema de válvulas de seguridad

Almacena y retiene los sólidos.

Evacúa los líquidos hacia el exterior.

Impide el regreso de sustancias a la cavidad oral del paciente al empujar de nuevo el émbolo

Edad de inicio



A partir de

12 meses

# Sí es reutilizable en el mismo paciente



Especialmente pensado para pacientes con episodios de atragantamiento repetitivos.

Se deben seguir las pautas de limpieza indicadas.

Se facilitará acceso a kit específico basado en detergente enzimático aprobado por USA.

# Caja POS España



Especialmente diseñada para  
Puntos de Venta

**dechoker**  
breathing is mandatory



Descarga ya nuestra

**App**





# Respaldo SEMES



La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias:

Considera interesante el uso del dispositivo anti-atragantamiento Dechoker en la Medicina de Urgencias y Emergencias

# SAPROLIMP S.L.

TODO EN SISTEMAS DE LIMPIEZA

**desde 1979**

**Hostelería Residencias  
Hospitales Colectividades  
Lavanderías Industriales**



OFICINAS Y ALMACÉN  
Polig. Ind. Mariarte C/12, n.º 48  
48480 ARRIGORRAGA (Bizkaia)  
Tel: 944 479 960 - 944 475 093  
Fax: 948 400 440