

## **DELANTAL UROLOGICO (RTU)**

**Referencia:** 100170209208

**Finalidad prevista**

Producto estéril, de un solo uso, utilizado en resecciones transuretrales tanto para lavado, como para la recogida de tejidos reseccionados.

**Características del producto**

El delantal consta de varias partes todas ellas unidas entre sí: el propio delantal, el embudo con filtro fácilmente extraíble y el tubo de salida de líquidos.

**Instrucciones de uso**

El delantal se sujeta por un lado, atándolo a los dos soportes de las piernas del paciente, y por el otro lado, sujetado al cuello del cirujano.

El delantal posee una alta resistencia al peso, para poder soportar el peso del líquido de lavado. En el interior del embudo, se incluye un filtro de malla tupida, fácilmente extraíble, que permite el paso del líquido de lavado, pero que retiene los tejidos reseccionados, permitiendo así su posterior recogida para su posible análisis.


El tubo corrugado de evacuación del delantal, debe colocarse en el interior de un recipiente recolector o bien introducirse directamente en el sumidero de evacuación de líquidos de irrigación.

**Advertencias y Precauciones**

Se recomienda almacenar a temperaturas entre 4°C y 50°C.

No reesterilizar: peligro de contaminación.

El producto después de su utilización, no contiene restos biológicos. Desechar por los métodos habituales del centro hospitalario.

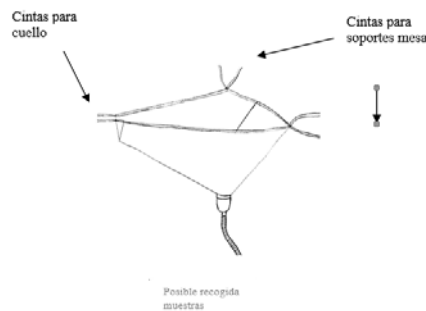

### **Simbología**

A continuación se explica el significado de la simbología en el etiquetado del producto:



Símbolo que indica el nombre y la dirección del fabricante.



Símbolo que indica que el artículo es un producto sanitario.



Símbolo que indica el número de referencia con que se puede identificar al producto.



Símbolo que indica el número de lote del producto.



Símbolo que indica la fecha de caducidad del producto.



Símbolo que indica que el producto es de un solo uso.



Símbolo que indica que el producto lleva una barrera estéril y se esteriliza por óxido de etileno.



Símbolo que indica que el producto no se puede reesterilizar.



Símbolo que indica Advertencias



Símbolo que indica consultar las instrucciones de uso.



Símbolo que indica el identificador único del producto.



Símbolo que indica la conformidad del producto con los requisitos aplicables del Reglamento UE 2017/745 sobre productos sanitarios y el Organismo Notificado número 0051.



Símbolo que indica no utilizar el producto si el envase está dañado o roto.



Símbolo de mantener fuera de la luz del sol.

Para comunicar cualquier incidente adverso, por favor contacte con la autoridad competente AEMPS <https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.de> y con Intraven [info@intraven.es](mailto:info@intraven.es)



Intraven S.L.  
Ctra. Ajalvir-Torrejón Km. 3,300  
Pol. Ind. Conmar ,8  
28864 Ajalvir Madrid