

¿QUÉ DEBE SABER ANTES DE SOMETERSE A UN TRATAMIENTO CON ÁCIDO HIALURÓNICO?



PRIMERA CONSULTA CON SU MÉDICO: ENTENDER SUS EXPECTATIVAS

Es importante que su médico entienda exactamente cuáles son sus necesidades y en qué sentido desea mejorar la estética de su rostro, por lo que examinarán juntos todas las posibilidades para verificar que el tratamiento con los productos de relleno CYTOSIAL corresponden a sus expectativas: cada situación puede exigir utilizar uno o varios productos.

1

PREPARARSE ANTES DEL TRATAMIENTO

Este tipo de tratamiento no requiere de una preparación específica, salvo en casos concretos.

Antes de empezar la sesión, se le pedirá desmaquillarse, si fuera el caso.

Es importante que indique a su médico, el tratamiento que haya podido recibir en las 72 horas anteriores a la sesión de infiltración con ácido hialurónico.

2

DURANTE EL TRATAMIENTO

Las técnicas de infiltración de productos de relleno pueden variar de un médico a otro.

El material a utilizar varía además según la zona a tratar y la técnica que se utilice.

El médico podrá infiltrar utilizando una aguja o una cánula.

La cantidad de producto de relleno utilizado varía según los objetivos de su tratamiento.

¿ES DOLOROSO EL TRATAMIENTO?

Los productos de la gama CYTOSIAL se presentan en forma de un gel homogéneo que facilita su infiltración y su integración en la piel.

No dude en señalar a su médico si siente dolor:

Su médico sabrá cómo actuar para minimizar las molestias.

3

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Su médico le dará consejos prácticos para optimizar los resultados de su tratamiento después de la sesión. Se recomienda no maquillarse durante las 12 horas posteriores y evitar de la misma manera durante las dos semanas siguientes una exposición prolongada al sol, los rayos UV, el calor o el frío incluyendo el uso de la sauna o el hamman.

¿EN QUÉ ZONAS DEL ROSTRO SE INYECTA EL ÁCIDO HIALURÓNICO?

Los productos de relleno a base de ácido hialurónico pueden ser infiltrados en diferentes zonas del rostro:

- 1 En los pómulos, por ejemplo, para redefinir volumen
- 2 En los labios y arrugas peribucales, para dar forma o redibujar el contorno
- 3 Para tratar las arrugas profundas del rostro
- 4 Para reducir las líneas de marioneta
- 5 Para mejorar el aspecto de los surcos nasogenianos

Y para otras indicaciones que podrá detallar su médico



¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS DE LA GAMA CYTOSIAL?

La gama CYTOSIAL está compuesta de varios productos destinados a responder a las necesidades de cada zona del rostro. Cada producto presenta características diferentes, adaptadas al resultado esperado.

No dude en pedir mayor información a su médico.




¿POR QUÉ CONFIAR EN NUESTRA GAMA CYTOSIAL?

La calidad y la seguridad de nuestros productos son prioritarias para BIOXIS PHARMACEUTICALS.

Con su base en Francia, nuestro laboratorio desarrolla y fabrica los productos de relleno en nuestra planta de Investigación y Desarrollo y de Producción ubicada en Lyon. Nuestra formulación de ácido hialurónico está patentada y responde a todas las exigencias de resultados y de seguridad.



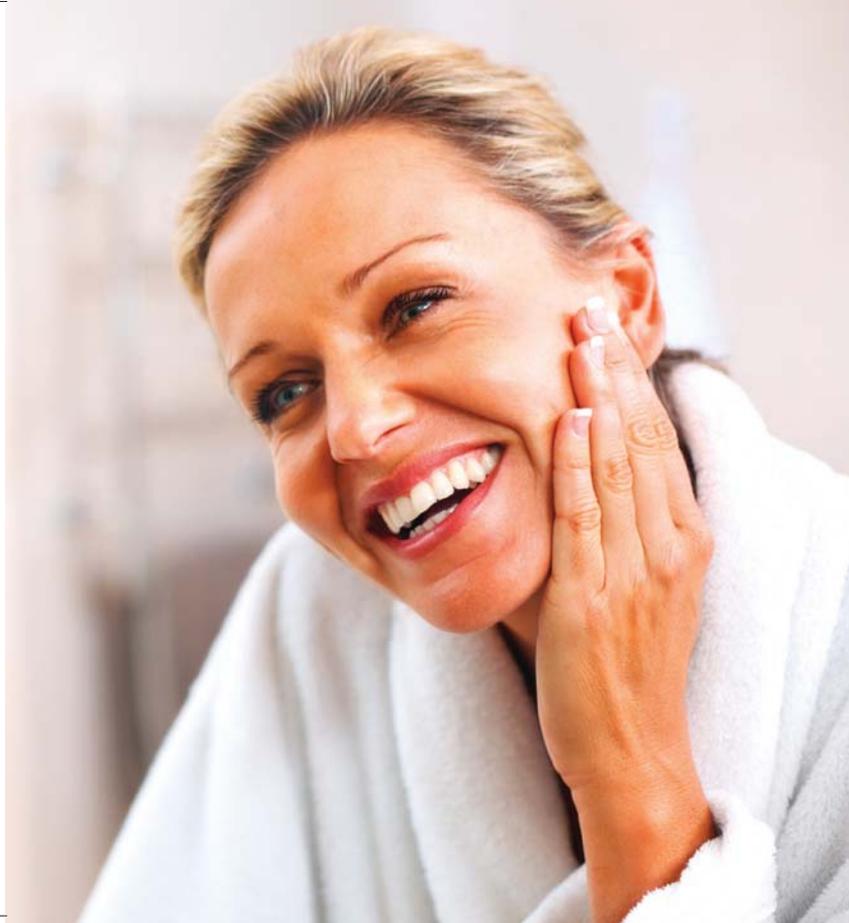

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES COMUNES A LAS INFILTRACIONES CON PRODUCTOS DE RELLENO A BASE DE ÁCIDO HIALURÓNICO?

Independientemente de la marca de producto utilizada, estas son las contraindicaciones:

- Mujeres embarazadas o en lactancia.
- Hipersensibilidad conocida a uno de los ingredientes.
- Personas que sufren epilepsia no controlada con un tratamiento.
- Personas con tendencia a desarrollar cicatrices hipertróficas.
- Personas afectadas de porfiria.
- Menores de edad.

**EN CASO DE DUDAS O PREGUNTAS
O SI CREE SUFRIR UN EFECTO ADVERSO,
CONTACTE CON SU MÉDICO**

CENTRO MÉDICO:

BIOXIS PHARMACEUTICALS
317 avenue Jean Jaures,
69007 Lyon, France
www.bioxis.com

CYTOSIAL®
CYTOSIAL es una marca registrada
De BIOXIS Pharmaceuticals S.A.S.
CYTOSIAL es fabricado
por BIOXIS Pharmaceuticals S.A.S.

DISTRIBUIDO
EN ESPAÑA POR:


Sebbin
PARIS